

1 Η συσκευή IDAL™ στη θήκη.



2 Τοποθετήστε την μπαταρία, πλήρως φορτισμένη.



3 Πλοηγηθείτε στο μενού και μηδενίστε τους μετρητές.



Πιέστε το πλήκτρο επανεκκίνησης 'reset button' αν χρειαστεί.

4 Με τον ακροδέκτη στραμμένο προς τα κάτω, εισάγετε το διάλυμα έκπλυσης.



5 Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για 10 κύκλους έκπλυσης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ομοιόμορφη ροή από κάθε ακροφύσιο, σε περίπτωση χρήσης διπλής συσκευής.



Βεβαιωθείτε ότι η μικρή φυσαλίδα βρίσκεται μέσα στη μεγάλη φυσαλίδα.

6 Με τον ακροδέκτη στραμμένο προς τα κάτω, διατρήστε το ελαστικό πώμα στο κεντρικό σημείο του καλύμματος και εισάγετε το εμβόλιο. Ασκήστε πίεση στη βάση και περιστρέψτε για ασφαλή εφαρμογή.



7 Διατηρήστε πατημένο τον μηχανισμό ενεργοποίησης έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η ροή και εμφανιστεί το εικονίδιο με τα χοιρίδια στην οθόνη.



8 Είστε πλέον έτοιμοι για τη διαδικασία εμβολιασμού των χοίρων.

